


Istruzioni per la misurazione della protezione per la doccia Logo Proof




Protezione per la doccia Logo Proof


Per determinare la taglia corretta, si prega di misurare la circonferenza del braccio nei punti indicati nell'immagine 1, utilizzando un nastro di misurazione sulla parte superiore del braccio sotto l'ascella (immagine 2) e sull'avambraccio sotto il gomito (immagine 3).

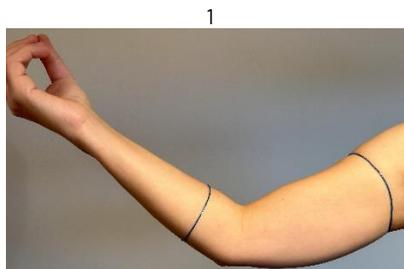

Die Bänder kennzeichnen die zu messenden Stellen am Arm

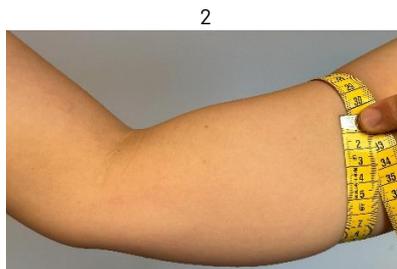


Mit Hilfe eines Messbandes den Armumfang unterhalb der Achsel messen

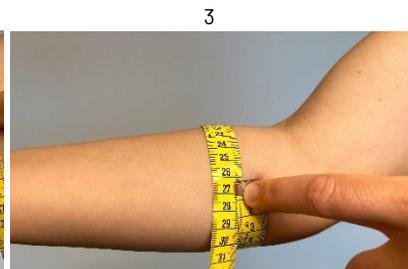

Den Armumfang am Unterarm unterhalb des Ellenbogens messen

In caso di dubbio, scegliere la taglia più piccola.

Se si nota una grande differenza tra la circonferenza del braccio superiore e inferiore, per cui nessuna delle due taglie è adatta, è possibile indossare il Logo Proof completamente sul braccio superiore (Fig. 5), in modo che entrambe le labbra si adattino bene e racchiudano il braccio. In questo caso, si prega di misurare la circonferenza del braccio sulla parte superiore sopra il gomito (Fig. 4) anziché sull'avambraccio.

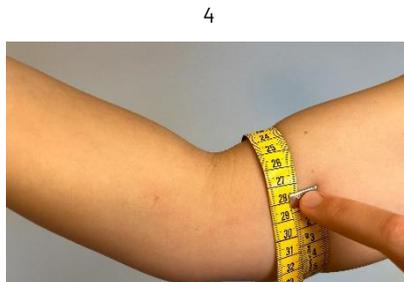

Misurare la circonferenza del braccio sopra il gomito



Il Logo Proof può essere indossato anche completamente sulla parte superiore del braccio.

Le due labbra del Logo Proof devono racchiudere saldamente il braccio per essere sigillate.